

SISTEMA DE INSERCIÓN

Gold T[®]



EUROGINE, S.L. · C/ ANTONIO GAUDÍ, 91 · 08830 SANT BOI DE LLOBREGAT · BARCELONA (SPAIN)

TEL. 93 630 43 45 · FAX. 93 630 39 71

www.eurogine.com · eurogine@eurogine.com


1. Sistema de inserción del DIU Gold T[®]

Regular la posición del pistón según la histerometría previa obtenida

Una vez hecha la histerometría regule el pistón del insertador a una posición equivalente o cercana a la medida obtenida con el histerómetro

2. Sistema de inserción del DIU Gold T[®]


Insertador preparado con el DIU
escamoteado en la cánula listo para su
inserción

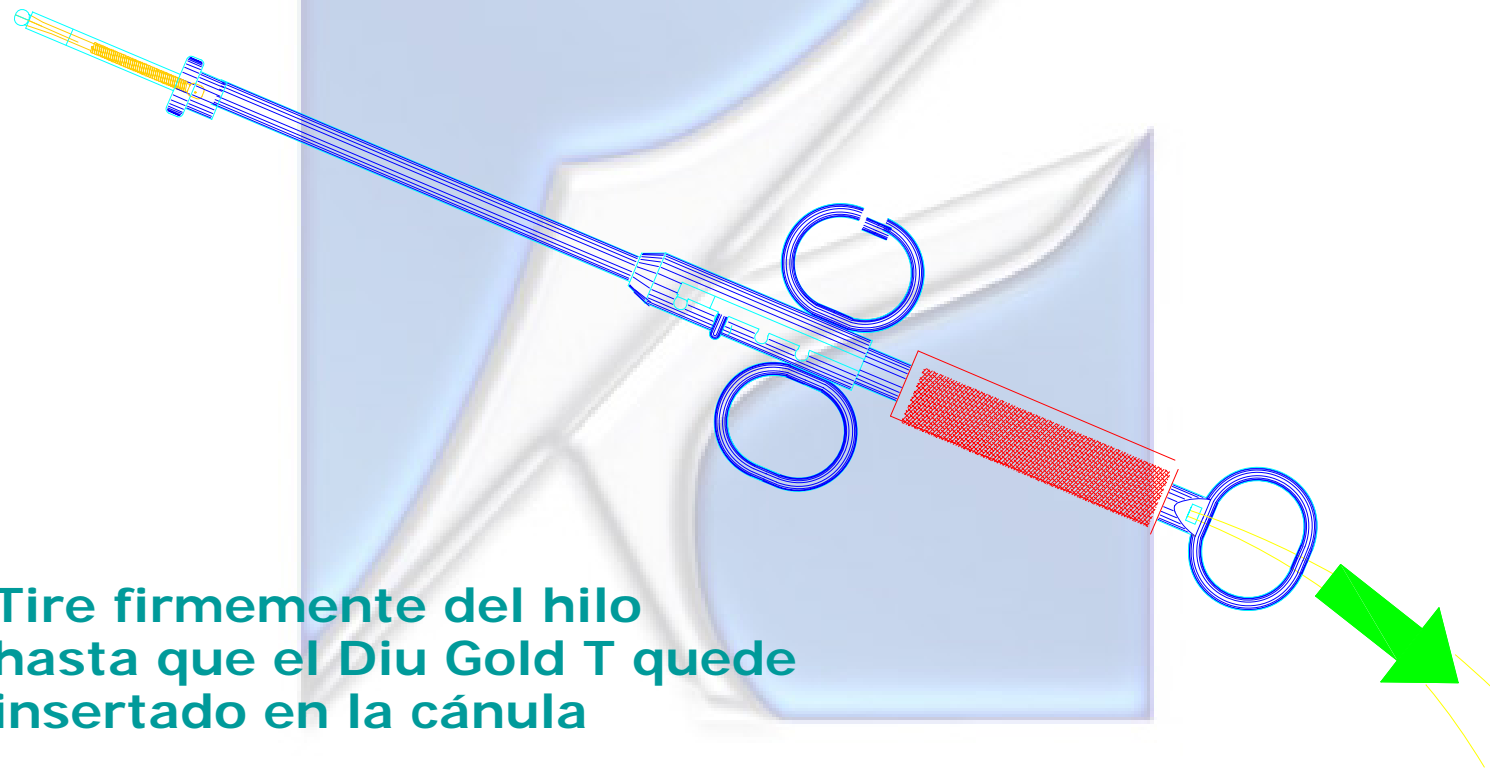

Tire firmemente del hilo
hasta que el Diu Gold T quede
insertado en la cánula

3. Sistema de inserción del DIU Gold T[®]

Introducción de la cánula en el canal cervical y extracción del seguro

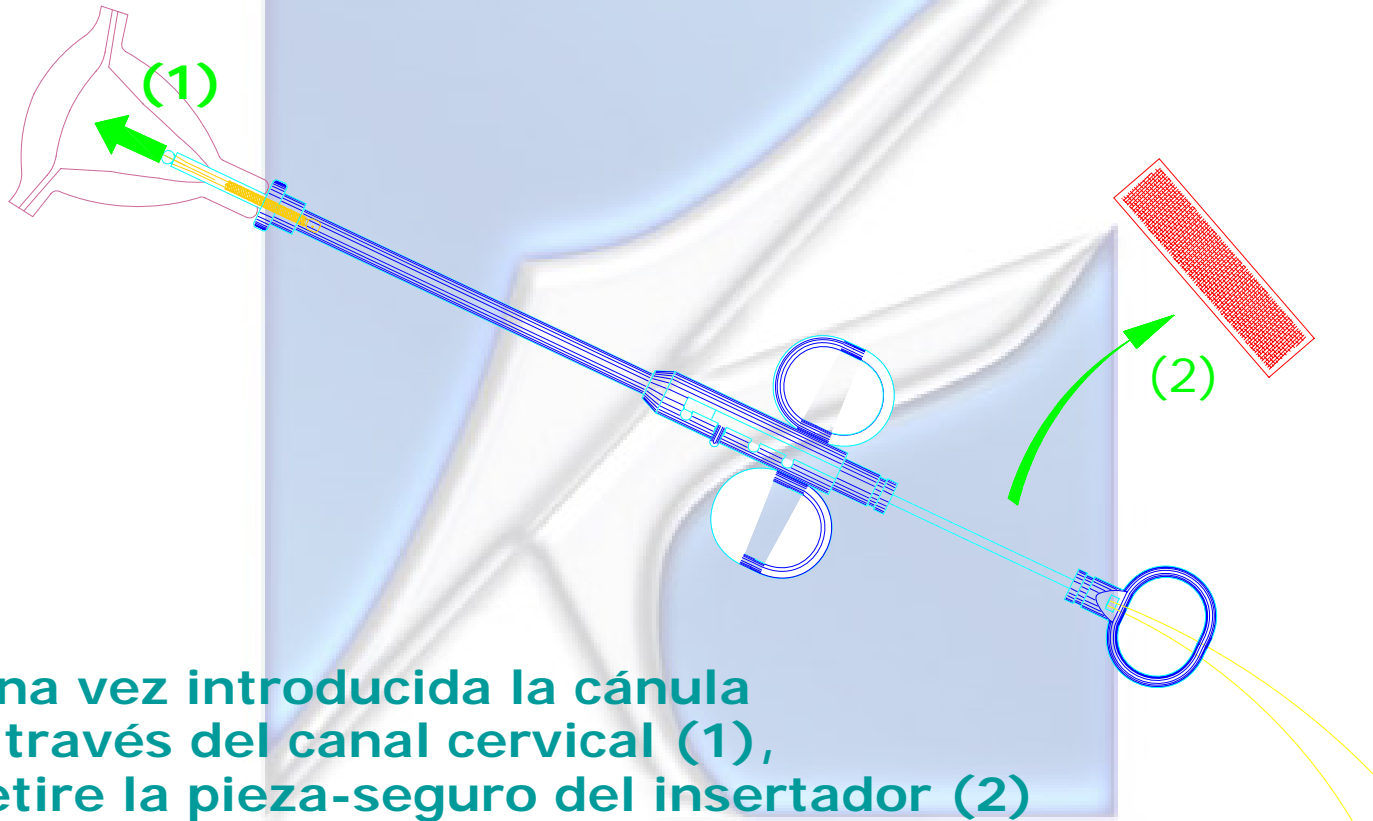

Una vez introducida la cánula a través del canal cervical (1), retire la pieza-seguro del insertador (2)

4. Sistema de inserción del DIU Gold T[®]



5. Sistema de inserción del DIU Gold T[®]



6. Sistema de inserción del DIU Gold T[®]

